

## Prefert® Vajinal Jel

### Hamile Kalmak İsteyenler Çiftler için

Prefert® sperm aktivitesini desteklediği klinik olarak test edilmiştir. . Prefert® internet üzerinden ve eczanelerden reçetesiz olarak temin edilebilir.

Daha fazla bilgi için web sitemiz:  
[www.prefert.com.tr](http://www.prefert.com.tr)

#### İçeriği :

Purified Water, Sodium Chloride, Sodium Phosphate, Potassium Phosphate, Arabinogalactan, Hydroxyethylcellulose, Polyhexanide.

#### Parabenler ve Silikon Yağlar İçinermez.

#### Kutu içeriği :

- Önceden doldurulmuş 6 ml 4 adet enjektör Prefert jel
- 1 vajinal uygulama aplikatörü (tekrar kullanılabilir)

Bu paket içeriği bir yumurtlama dönemi için yeterlidir.

**Kullandıktan sonra :** Boş enjektörleri tekrar kullanmayın ve atın.

**Uygulama aplikatörü (tekrar kullanılabilir):** Yeniden kullanmadan önce bol ılık su ile yıkayın ve kurulayın.

Prefert® internet satış sitelerinde mevcuttur.

EAN 4013273001717



Medical Device  
Made in Germany



KESSEL medintim GmbH  
Nordendstr. 82 – 84  
64546 Mörfelden-Walldorf,  
GERMANY  
Tel. +49 (0) 6105 20 37 20  
Fax +49 (0) 6105 20 37 221  
E-Mail: [service@medintim.de](mailto:service@medintim.de)

[www.prefert.com.tr](http://www.prefert.com.tr)



Parabenler  
ve  
Silikon Yağ  
İçermez

# Prefert®

## Vajinal jel

Hamile kalabilmeyi  
destekleyen nemlendirici

  
**MEDintim**  
personal healthcare

## Prefert® Vajinal Jel

### Doğal yolla hamile kalabilmeyi destekleyen jel.

Her yedi çiftte birinde doğal hamilelik gerçekleşmez. Olası sebeplerden biri de, yumurtlama döneminde kadındaki vajinal asidik pH değeridir.

Bir kadının döngüsünün çoğunda, vajinadaki pH değeri 4 ila 4.5' tur ve bu nedenle asidiktir. Bu pH değeri, enfeksiyonlara karşı koruma sağlar, ancak aynı zamanda, spermin hayatta kalma şansı neredeyse ortadan kaldırır.

Sonuç olarak, bir kadının ovulasyon günlerinde pH değişir. Kadının döngüsünün bu aşamasında 7' den 7,5' e kadar pH, nötr ila alkalin aralığındadır. Spermilerin yumurtaya olan yolculuklarına başlaması için ideal ortamdır. Bir kadının ovulasyon günlerinde, pH değeri sperm için uygun bir değerde olmazsa, spermiler çok uzaklaşmaz ve yumurtayı dölleyemez. Doğal doğurganlık tehlikeye girer.

Prefert® Vajinal Jel sayesinde pahalı ve zahmetli Tüp Bebek ( IVF ) tedavilerinden önce, bebek özemlerine kavuşabilirler.



## Fertility jump-start

Prefert Vajinal Jel spermilerin yumurtaya ulaşabilmesi ve dölleyebilmesi için en uygun ortamı sağlar. Nöt pH 7.2 değere sahip, Prefert® spermileri asidik ortamdan korur ve daha uzun hayatta kalmalarına imkan verir.

Ozmotik özellikleri spermiler için optimum hareket alanı sağlar. Sperm motolitesini artırır. Spermilerin yumurtaya olan yolculuğuna başlayabilmesi için ideal bir ortam oluşturur.

### Özellikleri:

- Kokusuz
- Renksiz
- Tatsız
- Leke bırakmaz
- Suda çözünür
- Parabenler ve Silikon içermez

Prefert®  
Hamile kalabilmeyi destekleyen  
nemlendirici

Prefert® yumurtlama zamanında sperm aktivitesini artırır:

- Spermiler için optimum ortam sağlar.
- Doğal dölleme için ideal pH değeri sağlar.
- Spermilerin yumurtaya olan yolculuğunu optimize etmek için spermin hareketliliğini artırır ve ozmotik bariyeri azaltır.
- Prefert® Vajinal Jel, ozmolariteyi artırır.



Yeni geliştirilen formül Parabenler ve Silikon yağlar içermez. Prefert® Vajinal jel 20 den fazla ülkede mevcuttur.

Prefert® vajinal jelin kullanımı tahrişe veya rahatsızlığa neden oluyorsa, bu ürünün kullanımını durdurun ve sağlık uzmanınıza danışın. Yakın zamanda herhangi bir vajinal cerrahi geçirdiyse, kullanmadan önce sağlık uzmanınıza sorun. Aktif vajinal enfeksiyonunuz varsa Prefert® vajinal jeli kullanmayın.